

TP : Montage des dents sur armature

Date	Nom de l'étudiant	Sujet	Professeur
		PPA	Dr. Champion

Présentation et objectif	Connaissances prérequis	Connaissances pédagogiques abordées
Dans ce TP, vous devrez placer les dents prothétiques sur l'armature à l'aide de cire de laboratoire. Si ce travail est généralement fait par le prothésiste, vous aurez fréquemment (voire systématiquement au CHU) besoin de remonter les dents. De plus, afin d'analyser avec précision ce qui a été fait par le prothésiste, il est nécessaire de l'avoir fait au moins une fois soi-même.	<ul style="list-style-type: none"> Théorie du montage des dents 	<ul style="list-style-type: none"> Pratique du montage des dents

	Indications pour l'étudiant	Indications pour l'enseignant	
Objectifs (Travail à réaliser)	<ul style="list-style-type: none"> Placement des dents dans le plan sagittal (points de contact, continuité de l'arcade) Placement des dents dans le plan vertical (occlusion) Finition des cires 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la position des dents et de l'occlusion 	Aide pédagogique \ Matériaux requis <ul style="list-style-type: none"> Le placement des dents dans le sens vertical peut se faire en plaçant un boudin de cire molle sur la selle, puis la dent, avant de mettre les modèles en occlusion. La dent sera alors grossièrement placée. A vous d'ajuster sa position sur l'arcade et d'affiner l'occlusion. La finition des cires se fait à deux niveaux. La fausse gencive, et le collet. N'hésitez pas à appliquer un surplus de cire, puis à la sculpter en soustraction ensuite. En grattant avec une lame froide pour la forme, puis en passant un couteau à cire très chaud, vous obtiendrez une forme et un état de surface convenables. Le collet se sculpte avec une lame froide type Zahl, en passant dans le sulcus. Vous pouvez demander à Eric, Xavier ou Julien de passer un coup de chalumeau sur vos cires afin d'en figer l'état de surface (attention au collet qui peut perdre en définition).
Informations (Détails du TP)	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez placer les dents en fonction de l'antagoniste et du plan d'occlusion. Une fois cela fait, vous pouvez passer à la dent suivante en distal. Lorsque toutes les dents sont convenablement placées en termes d'occlusion et de position dans l'arcade, vous pouvez passer à la finition de la fausse gencive. 		
Retours et avis (Quelles ont été vos difficultés lors de ce TP ? Qu'est ce qui pourrait, selon vous, être amélioré ?)			Autres ressources Vous pouvez trouver une vidéo du TP sur tpdentaire.fr , dans la rubrique Prothèse -> PPA -> 3ème année.
Notation	<ul style="list-style-type: none"> Occlusion /7 Forme de l'arcade /5 Finition des cires /8 	<ul style="list-style-type: none"> Occlusion /7 Forme de l'arcade /5 Finition des cires /8 	
Résumé Explication de la notation, pour l'enseignant comme pour l'étudiant			Commentaires (facultatif)