

### Description du produit

Cavit™ (rose), Cavit™ W (blanc) et Cavit™ G (gris) sont des produits radio-opaques autodurcissants à l'humidité destinés à l'obturation temporaire des cavités.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

 Le mode d'emploi de ce produit doit être conservé pendant toute la durée de son utilisation.

### Indications

- Obturations temporaires

### Précautions d'emploi

Vous pouvez vous procurer les fiches de sécurité 3M (MSDSs) sur le site internet : [www.mmm.com](http://www.mmm.com) ou auprès de votre filiale locale.

### Préparation

- ▶ Afin de parer à toute rupture de l'étanchéité du tube, utiliser la clé fournie avec le tube pour extruder la pâte.

### Application

- ▶ A l'aide d'un instrument, appliquer la quantité de produit Cavit nécessaire dans la cavité humide. Cavit et Cavit W durcissent en 2 heures, Cavit G durcit en 4 heures. Pendant ce temps, éviter de faire pression en mastiquant.
- ▶ Il n'est pas nécessaire de remplir totalement les cavités profondes. Dans le cas d'obturation sur des pansements médicamenteux, veiller à appliquer le matériau sans pression.
- ▶ Pour déposer l'obturation temporaire, utiliser des instruments rotatifs.

### Conseils

- En raison de la sensibilité du matériau à l'humidité, refermer le tube ou le flacon à bouchon fileté immédiatement après avoir effectué le prélèvement de sorte que le matériau ne soit pas difficile à extraire et qu'il ne devienne pas visqueux (dû à la pénétration de l'humidité dans le contenant).

### Stockage et conservation

Le produit doit être conservé à une température comprise entre 15 et 25°C (59-77°F).

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Une fois entamés, les tubes ou les flacons à couvercle fileté doivent être utilisés le plus rapidement possible.

### Information clients

Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

### Garantie

3M Deutschland GmbH garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M Deutschland GmbH DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ ET EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADEQUATION A LA COMMERCIALISATION OU A UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. L'utilisateur est responsable de l'emploi et de l'utilisation à bon escient du produit. Si ce produit est atteint d'un vice durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M Deutschland GmbH sera la réparation ou le remplacement du produit 3M Deutschland GmbH.

### Limitation de responsabilité

A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, y compris garantie, contrat, négligence ou dol, et ce, indépendamment de toute considération juridique.

Validité des informations : avril 2016