

# Fix Adhesive

Adhésif pour empreintes à l'alginate

# Fix Solvent

Produit nettoyant pour l'élimination des adhésifs Fix

AVERTISSEMENT : Réservé à l'usage dentaire.

Table des matières	Page
<b>1 Description du produit</b> .....	<b>8</b>
<b>2 Consignes de sécurité</b> .....	<b>9</b>
<b>3 Instructions étape par étape</b> .....	<b>10</b>
<b>4 Numéro de lot et date de péremption</b> .....	<b>10</b>

## 1 Description du produit

**Fix Adhesive** est un adhésif à base de solvant, qui augmente l'adhérence entre les matériaux à empreintes à l'alginate et la surface du porte-empreinte, et est disponible sous forme flacon ou spray.

**Fix Solvent** est un produit en aérosol, destiné à éliminer toutes traces d'adhésif du porte-empreinte après la prise et le moulage de l'empreinte.

### 1.1 Conditionnement du produit

#### Fix Adhesive – Liquid

- Flacon

#### Fix Adhesive – Spray

- Spray

#### Fix Solvent

- Spray

### 1.2 Composition

#### Fix Adhesive – Liquid

- Polymère de diéthylènetriamine
- Propan-2-ol
- Xylène
- Érythrosine

#### Fix Adhesive – Spray

- Polymère de diéthylènetriamine
- Propan-2-ol
- Xylène
- Érythrosine
- Gaz propulseur : Butane

#### Fix Solvent

- Propan-2-ol
- Xylène
- Gaz propulseur : Butane

### 1.3 Indications

#### Fix Adhesive

- Adhésifs pour empreintes à l'alginate.

#### Fix Solvent

- Éliminer les adhésifs Fix résiduels du porte-empreinte après la prise et le moulage de l'empreinte.

### 1.4 Contre-indications

- Allergie connue à la diéthylènetriamine ou à tout autre composant.

## 2 Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières de sécurité qui figurent dans d'autres chapitres du présent mode d'emploi.



### Symbole de sécurité.

- Il s'agit du symbole de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter sur les risques potentiels de blessure.
- Respecter tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole afin d'éviter d'éventuelles blessures.

### 2.1 Mises en garde

Le matériau contient de diéthylènetriamine, qui peut être irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses orales et peut causer des dermatites allergiques de contact chez les personnes sensibles.

- **Eviter tout contact avec les yeux** afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- **Eviter tout contact avec la peau** afin de prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact cutané se produit, éliminer le matériau à l'aide d'un coton imbibé d'alcool et laver complètement au savon et à l'eau. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- **Eviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/muqueuse** afin de prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau puis recracher/évacuer l'eau. Si l'inflammation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.
- **Ne pas respirer les vapeurs ou d'aérosol.**

### 2.2 Précautions d'emploi

Ce produit ne doit être utilisé que dans le cadre défini par le mode d'emploi. Toute utilisation de ce produit en contradiction avec le mode d'emploi est à l'appréciation et sous l'unique responsabilité du praticien.

- Utiliser des mesures de protection pour l'équipe dentaire et les patients tels que des lunettes en conformité avec les meilleures pratiques locales.
- Fermer hermétiquement le flacon immédiatement après usage.
- Utiliser le produit dans une zone parfaitement aérée. Ne pas inhaler.
- Pour protéger les flacons des risques d'éclaboussures ou autres projections de fluides corporels ou bien encore des mains souillées, il est obligatoire que le flacon soit manipulé hors de l'unité dentaire à l'aide de gants propres/désinfectés.
- Appliquer l'adhésif uniquement sur des porte-empreintes décontaminés.
- Fix Adhesive – Liquid est hautement inflammable, Fix Adhesive – Spray et Fix Solvent sont extrêmement inflammables : Tenir à distance de toute source d'ignition.
- Interactions :
  - Fix Adhesive forme un lien adhésif entre le matériau à empreintes à l'alginate frais et la surface du porte-empreinte.

### 2.3 Réactions indésirables

- En cas de contact avec les yeux : Irritation et dommage possible au niveau de la cornée.
- En cas de contact avec la peau : Sensibilisation. Irritation et possible réactions allergiques. Des rougeurs peuvent apparaître sur la peau.
- En cas de contact avec les tissus mous : Inflammation (voir « Mises en garde »).

## 2.4 Conservation

Des conditions de stockage inappropriées abrègeront la durée de conservation et seront susceptibles de produire un dysfonctionnement du produit.

- Tenir le produit à l'abri des rayons directs du soleil et stocker dans un endroit bien ventilé.
- Conserver à des températures comprises entre 10 °C et 24 °C. Le produit est à utiliser à température ambiante.
- Maintenir le récipient fermé hermétiquement.
- Ne pas percer ou brûler le récipient, même après utilisation.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.

## 3 Instructions étape par étape



### Bouchage de la buse de pulvérisation.

Avant d'utiliser le spray, assurez-vous que la buse de pulvérisation n'est pas bouchée. Utiliser des mesures de protection pour l'équipe dentaire et les patients tels que des lunettes en conformité avec les meilleures pratiques locales.

### 3.1 Application

1. Sélectionner le porte-empreinte approprié.
2. Avant de mélanger le matériau à empreintes à l'alginate, appliquer une fine couche de Fix Adhesive sur la surface intérieure du porte-empreinte. Ne pas déborder du porte-empreinte sur les surfaces qui ne seront pas couvertes par le matériau à empreintes.
3. Laisser sécher la couche d'adhésif pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'elle commence à prendre.
4. Charger le matériau à empreintes dans le porte-empreinte de la manière habituelle.

### 3.2 Nettoyage

1. Après la prise d'empreintes et la coulée du plâtre, retirer l'empreinte en alginate du porte-empreinte.
2. Pour éliminer toute trace d'adhésif résiduel, vaporiser Fix Solvent sur la surface intérieure du porte-empreinte. Laisser agir le produit pendant quelques secondes pour dissoudre les traces d'adhésif résiduel.
3. Essuyer soigneusement le solvant résiduel avec un papier absorbant.

## 4 Numéro de lot ( ) et date de péremption ( )

1. Ne pas utiliser après la date de péremption.  
Le format standard ISO est utilisé : « AAAA-MM » ou « AAAA-MM-JJ ».
2. Les références suivantes doivent être citées dans chaque correspondance:
  - Référence du produit
  - Numéro de lot
  - Date de péremption